

• KINESIOLOGY • REGENERATION • MOBILITY • RELIEF • RECOVERY • STABILITY •



TAPE

CORRECTION

LOOP



NICHT HAFTENDES TAPE ZUR KORREKTUR UND
UNTERSTÜTZUNG DES DAUMENSATTELGELENKS



für
DAMEN &
HERREN

COMPRESSANA DAUMEN-LOOP Der ideale Begleiter durch den Tag

Schmerzen beim Aufdrehen von Flaschen und Gläsern?

Wir benötigen unsere Hände jeden Tag. Ob wir schreiben, das Smartphone bedienen, schwere Einkaufstüten heben oder ein Schraubglas öffnen. Eine entscheidende Rolle spielt dabei der Daumen. Er kann den anderen Fingern derselben Hand gegenüber gestellt werden und ist dadurch für die Greiffunktion essenziell.

Wenn bei einfachen Handgriffen wie Drehen und Halten der Daumenballen oder die Daumenbasis schmerzt, dann fällt festes Zugreifen schwer. Dann bereiten alltägliche Tätigkeiten wie das Aufschrauben einer Flasche, das Umdrehen eines Schlüssels im Schloss oder das Auswingen eines Lappens Probleme.

Ursachen und Entstehung

Diese Schmerzen, die vor allem bei Bewegung und Belastung auftreten, sowie die verminderte Kraft beim Zupacken können verschiedene Ursachen haben. Oft liegt es an einer dauerhaften mechanischen Überbeanspruchung. Oder schwache Bänder und Muskeln lassen dem Daumensattelgelenk zu viel Spiel, was zu einer Fehlbelastung führen kann. Dazu kann es auch bei genetisch bedingter Bindegewebschwäche oder durch hormonelle Umstellungen (Menopause) kommen. Am Ende kommt es dann zum Gelenkverschleiß, medizinisch als Rhizarthrose bezeichnet.

Ebenso können Prellungen, Verstauchungen sowie Bänderverletzungen (z. B. Skidaumen bei Stürzen auf die Hand oder Hängenbleiben des Daumens) ursächlich sein.



Kann auch im Wasser genutzt werden



Entlastung bei Alltagstätigkeiten


Hilfe, wenn mein Daumen streikt!

Das COMPRESSANA Daumen-Loop stützt und stabilisiert das Daumensattelgelenk und beschränkt schmerzhafte Drehbewegungen des Daumens. Die natürliche Beweglichkeit von Daumen und Hand bleibt erhalten. Der Daumen wird so entlastet und die Schmerzen können beim Greifen reduziert werden.


Das COMPRESSANA Daumen-Loop ist ein elastisches Stoffband mit vorbereiteter Schlaufe und Klettverschluss, das nach dem gleichen Prinzip wie ein Kinesiotape arbeitet. Es kann schnell und einfach selbst angelegt werden, ohne Zuschneiden und Kleben. Es ist auch für empfindliche Haut geeignet und kann ohne Einschränkungen in nasser oder feuchter Umgebung und sogar direkt im Wasser genutzt

werden. Die Korrekturfunktion kann individuell angepasst und variabel eingestellt werden.

Mit dem Daumen-Loop können alle Tätigkeiten aus dem privaten Alltag, bei der Arbeit und beim Sport ausgeführt werden, auch in Handschuhen. Das wasserfeste und atmungsaktive Material trägt sich angenehm auf der Haut. Die Greiffunktion der Hand bleibt weitgehend erhalten.

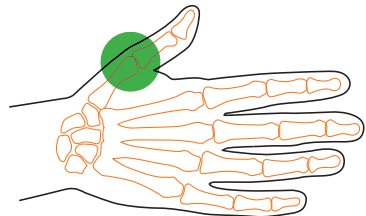

Das Daumensattelgelenk

Produkt	Größe	Korrekturstärke	Art. Nr.	Farben	
TAPE LOOP Daumen-/Daumensattelgelenk mit Rollschlaufe und verstellbarem Klettband für rechts u. links	I - V	variabel	3190 LI 3190 RE	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="background-color: #0070c0; color: white; padding: 2px;">ocean</div> <div style="background-color: #808080; color: white; padding: 2px;">diamant</div> </div>	
Größe	I / XS	II / S	III / M	IV / L	V / XL
Umfang am Handgelenk 	12 – 14 cm	14 – 16 cm	16 – 18 cm	18 – 20 cm	20 – 22 cm



Material: 50% Polyurethan,
37% Polyamid, 13% Elastan



Auch für den Fuß erhältlich:

TAPE CORRECTION SOX

SOCKEN/STRÜMPFE MIT ZUGBAND

TAPE CORRECTION LOOPS

NICHT HAFTENDE HAUTFREUNDLICHE
TAPE-SCHLAUFEN



Für mehr Mobilität im Alltag bei Problemen mit Hallux valgus, Hammerzehe oder Knick-Senk-/Spreizfuß. Weitere Infos finden Sie unter www.tapesox.de



COMPRESSANA GmbH

Böhmerwaldstr. 3 · 93073 Neutraubling · Germany

Tel.: +49 (0) 9401 9226-0 · Fax: +49 (0) 9401 9226-20

info@compressana.de · www.compressana.de

A member of the Juzo Group

Art.-Nr. C285 cc 06/2023



4 064339 1105405